



## UM OLHAR SOBRE O SEU MEDIDOR BREEZE®2:

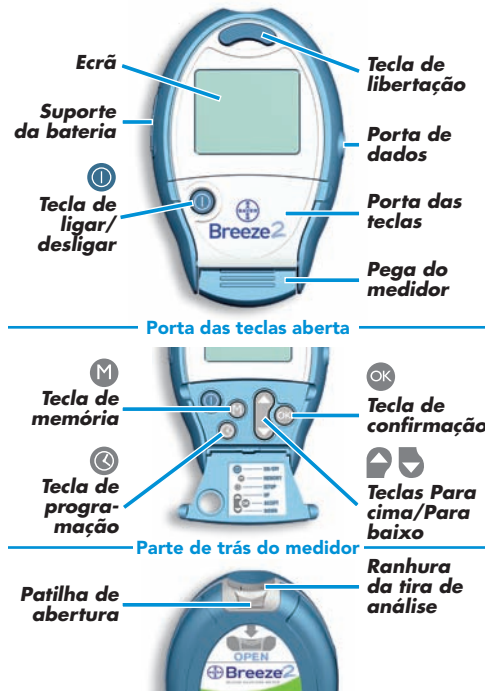

### 1. Abrir o medidor

Vire o medidor ao contrário (com o ecrã para baixo) e abra-o pressionando o rebordo posterior da **patilha de abertura** e, em seguida, puxando para cima.

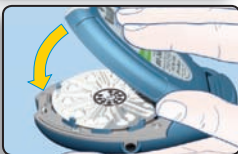

### 2. Introduzir o disco

Introduza um novo disco de 10 tiras integradas—com o lado irregular virado para cima.

Feché o medidor, certificando-se de que ouve um clique.

#### **IMPORTANTE:**

Mantenha o medidor na posição horizontal.

### 3. Preparar o dispositivo de punção

**PRECAUÇÃO:** O dispositivo de punção destina-se a uso individual, em apenas um doente.



Retire a tampa do dispositivo **MICROLET®2**.

Gire a tampa protectora de uma lanceta, rodando-a ¼ de volta, mas não a remova.

Introduza então a lanceta firmemente para “armar” o dispositivo.

Rode e remova a tampa da lanceta e volte a colocar a tampa do dispositivo.


Por favor, consulte o folheto informativo do dispositivo **MICROLET2** para obter uma informação completa.

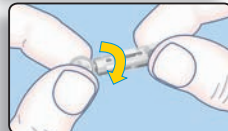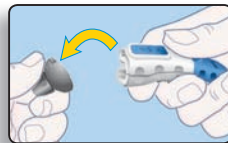

### 4. Extrair uma tira-teste


Puxe e empurre a pega do medidor para expor uma tira-teste e ligar automaticamente o medidor.

**Nota:** A tecla de libertação está para cima, uma tira-teste é empurrada para fora do dispositivo e, no ecrã, são apresentados vários avisos para “aplicar sangue”. O medidor está então pronto para realizar uma análise à glicose no sangue.

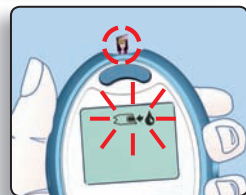

## 5. Análise

Pique o seu dedo formando uma pequena gota de sangue **redonda**.

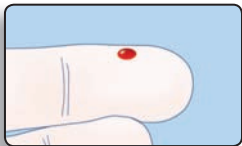

Desloque a ponta dianteira da tira-teste de modo a entrar em contacto com a gota de sangue. O sangue é automaticamente puxado para dentro da tira-teste enchendo-a por completo.




Mantenha a tira-teste no devido lugar até o medidor emitir bips e a contagem decrescente iniciar. Em seguida, afaste-a do dedo.




O resultado da análise surge no ecrã depois da contagem de 5 segundos e é automaticamente guardado no medidor para uma futura utilização.



Segure no medidor, virado para baixo, sobre um recipiente de desperdícios e prima a **tecla de libertação**.

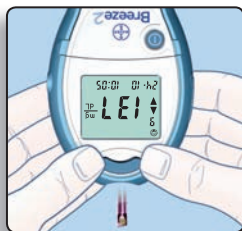


A tira-teste usada cairá dentro do recipiente de desperdícios.

Pressione a tecla  para desligar o medidor e poupar a carga da bateria. (Veja o interior da tampa dianteira para obter indicações sobre a localização.)

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E ERROS:



Ocorreu um problema ao encher por completo a tira-teste. Repita a análise com uma tira nova.

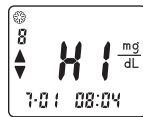

O resultado da análise é superior a 600 mg/dL. Lave as mãos e o local de análise e repita a análise. Se a indicação **HI** (elevado) aparecer novamente, contacte o seu médico ou profissional de saúde.



Bateria fraca. Substitua a bateria (CR2032) antes de efectuar 20 leituras ou de passar uma semana.

Consulte o guia do utilizador para obter as informações completas acerca da resolução de problemas e erros.



Bayer Consumer Care AG  
Postfach  
4002 Basel, Switzerland



Bayer HealthCare

Bayer Portugal S.A., Diabetes Care  
Rua Quinta do Pinheiro, 5  
2794-003 Carnaxide, Portugal  
Telef.: 808 269 269

©2008 Bayer  
50184414 Rev. 12/08



# Breeze<sup>2</sup>

SISTEMA DE CONTROLO DA GLUCOSE NO SANGUE



AUTOCODIFICAÇÃO 

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA