



La nuova pompa insulinica Paradigm® Veo™




Bolo Tasto menù



Semplice gestione dei dati
-
grazie alla trasmissione automatica

Misurazione e trasmissione dati con Contour® LINK

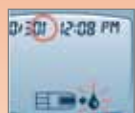


1) La freccetta d'invio (↑) conferma che l'apparecchio è pronto per trasmettere i dati.




2) Il segnale intermittente indica che il misuratore sta trasmettendo il risultato all'apparecchio Medtronic.

Programmazione della pompa Medtronic

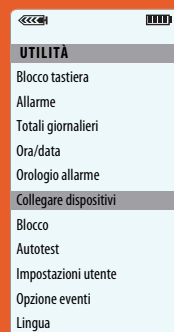


1) Selezionare nel menu principale l'opzione "Utilità" e poi "Collegare dispositivi", quindi premere il tasto ACT.

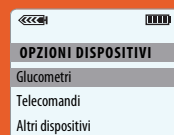

2) Selezionare "Glucometri" e premere il tasto ACT.



3) Selezionare "On" e premere il tasto ACT.

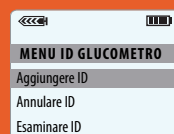

4) Selezionare "Aggiungere ID" e premere il tasto ACT.

5) Digitare il n. di serie del misuratore usando il tasto su/giù e premere poi il tasto ACT.

6) Dopo avere digitato il n. di serie del misuratore nella pompa premere il tasto ESC per tornare al menù principale.



Il misuratore di glicemia Contour® LINK di Bayer Diabetes Care con trasmissione di dati senza cavi

Dalla collaborazione di due specialisti per un controllo ottimale della glicemia.



Grazie al sistema integrato trasmettete i vostri dati senza alcun cavo...

...e gestite facilmente il diabete.



Per qualsiasi domanda sul misuratore **Contour® LINK** contattate il servizio clienti di Bayer Diabetes Care al n.

Tel. 044 465 83 55 oppure scrivete a info@bayerdiabetes.ch

Per domande sulla **pompa insulinica Medtronic** contattate l'apposita **hotline al n.: 0800 633 333**

Funzionalità basate sull'esclusiva tecnologia del collaudato misuratore di glicemia Bayer Contour®:

- Codifica automatica
- Esigua quantità di sangue
- 5 secondi per il test
- Tecnologia d'avanguardia per i sensori
- Nessun elemento di disturbo clinicamente rilevante
- Marker pasti e allarme



Contour® LINK trasmette, senza cavi, i valori glicemici alla vostra pompa insulinica MiniMed Paradigm® oppure al sistema di misurazione in tempo reale Guardian®:

- ✓ Risparmio di tempo
- ✓ Elimina le fonti di errore
- ✓ Semplifica il calcolo dei dosaggi di bolo grazie al calcolatore Bolus Wizard®
- ✓ Evita l'immissione manuale dei valori glicemici per la calibrazione del sistema di misurazione in tempo reale Medtronic
- ✓ Garantisce valori affidabili grazie alla codifica automatica

➔ **Semplifica la gestione del diabete.**



*Paradigm® 512, 712 e superiore più il nuovo Paradigm Veo 554/754

© 2011 Bayer Healthcare LLC. CONTOUR è un marchio registrato di Bayer Healthcare LLC. Bayer, la croce Bayer, il n. di codifica e il logo del n. di codifica sono marchi registrati di Bayer AG. Paradigm, Guardian e Bolus sono marchi registrati di Medtronic MiniMed, Inc.