

**BAYER**  
**Contour**<sup>®</sup>  
BLUTZUCKERMESSGERÄT




**OHNE**  
**CODIEREN**<sup>®</sup>

**KURZBEDIENUNGSANLEITUNG**

**Das CONTOUR - Messgerät:**



**CONTOUR Sensor:**

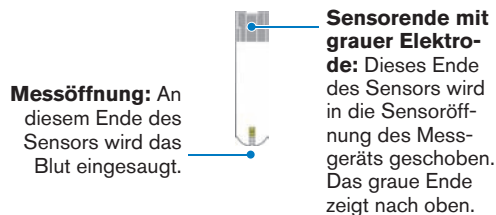

**Die Blutzuckerbestimmung**

Die detaillierte Beschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung. **ACHTUNG:** Die Stechhilfe ist für die Anwendung nur durch einen einzelnen Patienten vorgesehen.

**Vorbereiten der Stechhilfe:**


Ziehen Sie die Verschlusskappe von der MICROLET<sup>®</sup> 2 Stechhilfe ab. Halten Sie dabei den Daumen in die Haltevertiefung.



Drehen Sie die Schutzkappe einer Lanzette um 1/2 Drehung (nicht abnehmen).



Stecken Sie die Lanzette bis zum Anschlag in die Stechhilfe. Dadurch wird das Gerät einsatzbereit.

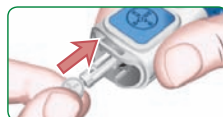

Drehen Sie die Schutzkappe von der Lanzette ab.



Setzen Sie die Verschlusskappe auf die Stechhilfe.



Stellen Sie an der Verschlusskappe die gewünschte Einstichtiefe ein.



Schieben Sie das graue Ende des Sensors in die Sensoröffnung des CONTOUR<sup>®</sup> Blutzuckermessgeräts.



Das Gerät wird dadurch automatisch codiert!

Das Messgerät schaltet sich ein. Auf dem Display wird ein Sensor mit einem blinkenden Blutstropfen angezeigt. Er weist darauf hin, dass das Messgerät für die Blutzuckermessung bereit ist.

**Entnahme des Blutstropfens an der Fingerbeere:**


Drücken Sie die Stechhilfe mit der Verschlusskappe fest gegen die Einstichstelle. Drücken Sie den blauen Auslöseknopf.



Streichen Sie von der Handfläche zum Finger mit der Einstichstelle, um dort einen Blutstropfen zu bilden. Die winzige Menge von 0.6 Millionstel Liter genügt.

**Testen des Blutes:**

Halten Sie die Messöffnung des Sensors sofort an den Blutstropfen. Das Blut wird automatisch in den Sensor gesaugt.

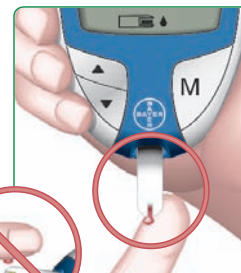


Halten Sie den Sensor an den Blutstropfen bis ein Signal ertönt.

Mit dem Signalton beginnen die 5 Sekunden Messzeit zu laufen. Dann wird Ihr Messergebnis\* angezeigt und automatisch gespeichert.



Wenn Sie den benutzten Sensor nach der Messung aus dem CONTOUR<sup>®</sup> ziehen, schaltet das Gerät automatisch ab.

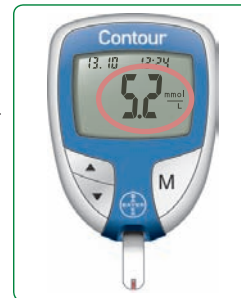

\*Das Messgerät wurde so eingestellt, dass die Ergebnisse in mmol/L angezeigt werden. Diese Einstellung ist im Gerät fixiert. Falls Ihre Ergebnisse in mg/dL angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Bayer Diabetes Care (Tel. 044 465 83 55).

**Entfernen der benutzten Lanzette:**

Halten Sie die Stechhilfe in einer Hand und den Daumen in der Haltevertiefung. Mit der anderen Hand halten Sie die Verschlusskappe am **Einstellung** fest und ziehen diese vorsichtig nach unten ab.



Legen Sie die Lanzettenschutzkappe mit dem Bayer-Zeichen nach unten auf eine flache Oberfläche.



Drücken Sie die sich immer noch in der Stechhilfe befindliche Lanzette vollständig in die Mitte der Lanzettenschutzkappe.

Entsorgen Sie die Lanzette, wie es in der Bedienungsanleitung der Stechhilfe beschrieben ist.


**Bei Fragen hilft Ihnen der Kundendienst von Bayer Diabetes Care unter Tel. 044 465 83 55 oder der E-Mail-Adresse [info@bayerdiabetes.ch](mailto:info@bayerdiabetes.ch) gerne weiter. Mehr Informationen zum Blutzuckermessen und Diabetes im allgemeinen finden Sie im Internet unter [www.bayerdiabetes.ch](http://www.bayerdiabetes.ch)**

**Verwenden des erweiterten Modus (L2)** Die detaillierte Beschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

### Einstellen des Messgeräts auf den erweiterten Modus

Wenn Sie die Mahlzeiten-Markierungen und weitere Funktionen nutzen wollen, können Sie das Gerät wie folgt auf den erweiterten Modus einstellen:

1. Drücken Sie **M**, um das Messgerät einzuschalten.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼** und halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Auf der Anzeige blinkt L-1.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das Gerät auf L-2 einzustellen.
5. Drücken Sie **M**, um die Einstellung zu speichern.

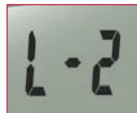

Sie finden am besten selbst heraus, wie Ihnen diese zusätzlichen Funktionen bei der Einstellung des Blutzuckers helfen. Mehr Informationen erhalten Sie auf der Website [www.bayerdiabetes.ch](http://www.bayerdiabetes.ch), beim Kundendienst von Bayer Diabetes Care oder bei Ihrer Diabetes-Fachperson.

### Markierung der Messergebnisse

Die detaillierte Beschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung.



**Vor der Mahlzeit** = Markiert ein Messergebnis, das vor einer Mahlzeit ermittelt wurde.




**Nach der Mahlzeit** = Markiert ein Messergebnis, das nach einer Mahlzeit ermittelt wurde.



**Aussergewöhnliches Messergebnis** = Markiert Ergebnisse, die aussergewöhnlich sind und für die Sie sich eventuell in Ihrem Blutzuckertagebuch Notizen gemacht haben.



**Alarm** = Alarm einstellen, um Sie daran zu erinnern, eine Blutzuckermessung in einem bestimmten Abstand zu einer Mahlzeit durchzuführen.

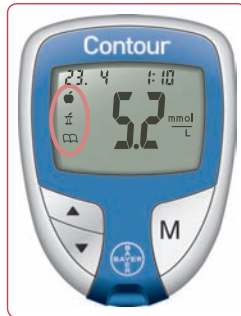

### Nach der Blutzuckermessung:

Zum Auswählen von	Sie sehen	Aktivieren	Sie sehen	Was es bedeutet	ALARM verwenden
<b>„Vor der Mahlzeit“</b> Drücken Sie <b>▲</b> oder <b>▼</b>		Drücken Sie <b>M</b>		Das Messergebnis wird als „Vor Mahlzeit gemessen“ markiert. Sie können nun einen Alarm einstellen, indem Sie nochmals <b>M</b> drücken.**	<p>Wenn der Alarm ertönt, schaltet sich das Messgerät automatisch ein. Die Anzeige zeigt das Ergebnis der Messung vor der Mahlzeit an, das Sie markiert haben, als Sie den Alarm eingestellt haben.</p> <p>Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Alarm auf stumm geschaltet, durch zweimaliges Drücken einer beliebigen Taste wird das Messgerät ausgeschaltet.</p> <p>Sie können nun eine neue Blutzuckermessung durchführen und das Messergebnis mit dem Symbol „Nach der Mahlzeit“ markieren  (siehe Tabelle nebenan).</p>
<b>„Nach der Mahlzeit“</b> Drücken Sie <b>▲</b> oder <b>▼</b>		Drücken Sie <b>M</b>		Das Messergebnis wird als „Nach der Mahlzeit gemessen“ gekennzeichnet.	
<b>„Außergewöhnliches Messergebnis“</b> Drücken Sie <b>▲</b> oder <b>▼</b>		Drücken Sie <b>M</b>		Das Ergebnis wird im Speicher als aussergewöhnlicher Blutzuckerwert markiert. Sie sollten dies in Ihrem Blutzuckertagebuch notieren.	

\*\*Der Alarm ist so voreingestellt, dass er nach 2 Stunden ertönt. Die detaillierte Beschreibung, wie Sie die Alarmzeit ändern, finden Sie in der Bedienungsanleitung.

### Fehlermeldungen und Lösungen:

Die Bedienungsanleitung enthält eine komplette Beschreibung der Fehlermeldungen.

<b>E1</b>	Temperatur ausserhalb des Betriebsbereichs.
<b>E2</b>	Der Sensor ist nicht vollständig mit Blut gefüllt. Wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Sensor.
<b>E3</b>	Gebrauchter Sensor. Wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Sensor.
<b>E11</b>	Nicht plausibles Messergebnis. Wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Sensor.



**Bayer HealthCare**

Bayer (Schweiz) AG, Diabetes Care  
Grubenstrasse 6, Postfach, CH-8045 Zürich  
Hotline: 044 465 83 55  
E-Mail: [info@bayerdiabetes.ch](mailto:info@bayerdiabetes.ch)  
Fax: 044 465 82 82  
Internet: [www.bayerdiabetes.ch](http://www.bayerdiabetes.ch)



Bayer Consumer Care AG  
Postfach  
4002 Basel, Switzerland



**Bayer**

Bayer, das Bayer Kreuz, *CONTOUR*, *MICROLET*,  
Ohne Codieren und das Ohne Codieren Logo  
sind Marken von Bayer.

N1089E  
Rev. 7/08