



**BAYER**  
**Contour**<sup>®</sup>  
SYSTÈME DE MESURE DE GLYCÉMIE

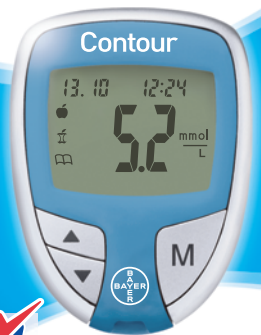

**MODE D'EMPLOI EN BREF**

## Le système de mesure CONTOUR de Bayer :

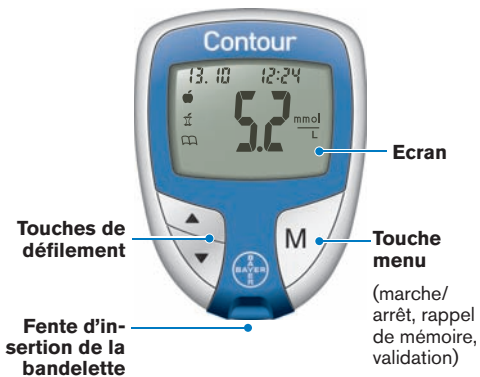

### Indicateur CONTOUR :

**Fente pour prise de mesure :** le sang est aspiré à cette extrémité de la bandelette.



**Extrémité de la bandelette à électrode grise :** cette extrémité de la bandelette est glissée dans la fente correspondante de l'appareil de mesure. L'extrémité grise est orientée vers le haut.

## Détermination du taux de glycémie

Vous trouverez une description détaillée dans la notice d'utilisation. **ATTENTION :** l'auto-piqueur est destiné uniquement à l'emploi par un seul patient.

### Préparation de l'auto-piqueur :

Oter le capuchon de fermeture de l'auto-piqueur *MICROLET*<sup>®</sup> 2. Placer le pouce dans le renforcement.



Faire pivoter le capuchon de protection d'une lancette d'un demi-tour (ne pas l'enlever).



Introduire la lancette jusqu'à la butée dans l'auto-piqueur. L'appareil est à présent prêt à l'utilisation.



Enlever en tournant le capuchon de protection de la lancette.



Placer le capuchon de fermeture sur l'auto-piqueur.



Régler la profondeur de l'incision souhaitée sur le capuchon de fermeture.



Glisser l'extrémité grise de la bandelette dans la fente correspondante du système de mesure de glycémie *CONTOUR*<sup>®</sup>.



L'appareil est ainsi automatiquement codé!

L'appareil de mesure se met en marche. L'écran montre une bandelette et une goutte de sang qui clignote. Il signale ainsi que l'appareil de mesure est prêt pour mesurer la glycémie.

### Prélèvement de la goutte de sang sur l'extrémité du doigt :

Presser fermement l'auto-piqueur avec le capuchon de fermeture contre l'endroit à piquer. Appuyer sur le bouton de déclenchement bleu.



Glisser de la paume de la main jusqu'au doigt et l'endroit à inciser afin d'obtenir une goutte de sang. La quantité minimale de 0,6 millionièmes de litre suffit.

### Test sanguin :


Placer la fente de mesure de la bandelette immédiatement sur la goutte de sang. Le sang est automatiquement aspiré par la bandelette.

**Maintenir la bandelette sur la goutte de sang jusqu'à l'émission d'un signal sonore.**

Le signal sonore indique le début du temps de mesure de 5 secondes. Puis le résultat de la mesure\* est indiqué et immédiatement mémorisé.

Lorsque vous retirez la bandelette utilisée du *CONTOUR*<sup>®</sup> après la mesure, l'appareil s'arrête automatiquement.

\* L'appareil de mesure a été réglé de manière à ce que les résultats soient affichés en mmol/L. Le réglage est mémorisé dans l'appareil. Si vos résultats sont affichés en mg/dL, veuillez vous adresser au service clients de Bayer Diabetes Care (tél. : 044 465 83 55).

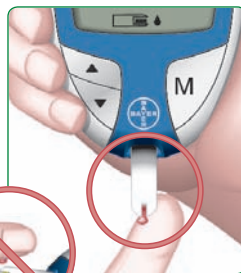

**Mesure de la glycémie sur l'extrémité du doigt**



### Oter la lancette utilisée :

Tenir l'auto-piqueur d'une main et le pouce dans le renforcement. De l'autre main, tenir le capuchon de fermeture au niveau de l'anneau de réglage et tirer le capuchon de fermeture avec précaution vers le bas.



Placer le capuchon de protection de la lancette en orientant le symbole Bayer vers le bas sur une surface plane.



Enfoncer la lancette qui se trouve encore dans l'auto-piqueur entièrement dans le centre du capuchon de protection pour lancette.

Jeter la lancette selon la description de la notice d'utilisation de l'auto-piqueur.

**Le service clients de Bayer Diabetes Care répond volontiers à vos éventuelles questions au n° de tél. 044 465 83 55 ou à l'adresse e-mail [info@bayerdiabetes.ch](mailto:info@bayerdiabetes.ch). Pour plus d'informations sur la mesure de la glycémie et du diabète, veuillez consulter le site Internet [www.bayerdiabetes.ch](http://www.bayerdiabetes.ch).**

**Utilisation du mode avancé (L2)** Vous trouverez une description détaillée dans la notice d'utilisation.

**Réglage de l'appareil de mesure sur le mode avancé**

Si vous souhaitez utiliser les repères de repas ainsi que d'autres fonctions, vous pouvez régler l'appareil sur le mode avancé comme suit :

1. Appuyer sur **M** pour mettre l'appareil de mesure en marche.
2. Appuyer sur ▲ ou ▼ et tenir la touche enfoncée durant 3 secondes.
3. L-1 clignote sur l'écran.
4. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour régler l'appareil sur L-2.
5. Appuyer sur **M** pour mémoriser le réglage.



**Inscription des résultats de la prise de mesure**

Vous trouverez une description détaillée dans la notice d'utilisation.



**Avant le repas** = inscription du résultat mesuré avant un repas




**Après le repas** = inscription du résultat mesuré après un repas



**Résultat de mesure inhabituel** = inscription des résultats inhabituels et pour lesquels vous avez éventuellement pris des notes dans votre journal-glycémie.



**Alarme** = régler l'alarme pour vous rappeler d'effectuer une mesure de glycémie à un intervalle déterminé d'un repas.

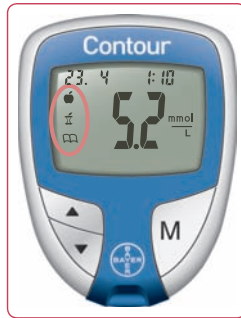

**Vous découvrirez par vous-même comment ces fonctions supplémentaires vous aident à contrôler votre taux de glycémie. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site Internet [www.bayerdiabetes.ch](http://www.bayerdiabetes.ch), auprès du service clients Bayer Diabetes Care ou auprès de votre spécialiste du diabète.**

**Après la prise de mesure de la glycémie :**

Pour sélectionner	Vous voyez	Activer	Vous voyez	Cela signifie	Utilisation de l'ALARME
<p><b>"Avant le repas"</b> Appuyer sur ▲ ou ▼</p>		Appuyer sur <b>M</b>		Le résultat de la mesure est inscrit en tant que "avant le repas". A présent, vous pouvez régler une alarme en appuyant de nouveau sur <b>M</b> **	<p>Lorsque l'alarme retentit, l'appareil se met automatiquement en route. L'écran indique le résultat avant le repas que vous avez noté en réglant l'alarme.</p> <p>En appuyant sur une touche quelconque, l'alarme est mise sous silence; par deux pressions sur une touche quelconque, l'appareil est arrêté.</p> <p>A présent, vous pouvez effectuer une nouvelle mesure de glycémie et marquer le résultat avec le 🍴 "après le repas" (voir tableau ci-contre).</p>
<p><b>"Après le repas"</b> Appuyer sur ▲ ou ▼</p>		Appuyer sur <b>M</b>		Le résultat de la mesure est inscrit en tant que "après le repas".	
<p><b>"Résultat exceptionnel"</b> Appuyer sur ▲ ou ▼</p>		Appuyer sur <b>M</b>		Le résultat est inscrit dans la mémoire en tant que taux de glycémie inhabituel. Vous devriez le noter dans votre journal-glycémie.	

\*\*L'alarme est pré-réglée de manière à retentir après 2 heures. Vous trouverez une description détaillée sur les possibilités de modifier la durée de l'alarme dans la notice d'utilisation.

**Messages d'erreur et solutions :**

La notice d'utilisation contient un descriptif complet des messages d'erreur.

<b>E1</b>	Température hors de la zone de service.
<b>E2</b>	La bandelette n'est pas entièrement remplie de sang. Renouveler la prise de mesure avec une nouvelle bandelette.
<b>E3</b>	Bandelette usagée Renouveler la prise de mesure avec une nouvelle bandelette.
<b>E11</b>	Résultat de mesure non plausible. Renouveler la prise de mesure avec une nouvelle bandelette.



Bayer (Suisse) AG  
Diabetes Care  
Grubenstrasse 6, Postfach  
CH-8045 Zürich  
Hotline : 044 465 83 55  
E-mail : [info@bayerdiabetes.ch](mailto:info@bayerdiabetes.ch)  
Fax : 044 465 82 82  
Internet : [www.bayerdiabetes.ch](http://www.bayerdiabetes.ch)

Bayer Consumer Care AG  
Postfach  
4002 Basel, Switzerland



Bayer

Bayer, la croix Bayer, *CONTOUR*, *MICROLET*, Codage Automatique et le logo Codage Automatique Logo sont des marques de Bayer.

N1090D  
Rev. 7/08