



**BAYER**  
**Contour**<sup>®</sup>

DISPOSITIVO DI MISURAZIONE DELLA GLICEMIA

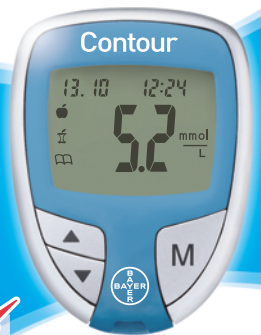

**GUIDA ALL'USO VELOCE**

## Il dispositivo di misurazione CONTOUR della Bayer:

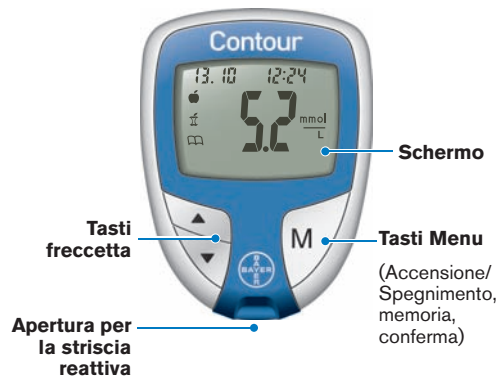

### CONTOUR Sensor:

**Apertura per la misurazione:** il sangue viene aspirato all'estremità della striscia reattiva.




**Estremità della striscia reattiva con elettrodo grigio:** questa estremità della striscia reattiva viene inserita nell'apertura del dispositivo di misurazione. L'estremità grigia indicata verso l'alto.

## La determinazione della glicemia

Troverete la descrizione dettagliata nella guida all'uso. **ATTENZIONE:** il pungidito va utilizzato solamente da un'unica persona.

### Preparazione del pungidito:

Togliere il cappuccio al pungidito **MICROLET**<sup>®</sup> 2. Mettete il pollice nell'apposito spazio.

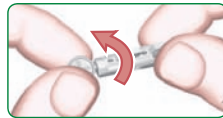

Allentare il cappuccio coprilancetta e ruotare per mezzo giro (non rimuovere completamente).

Inserire la lancetta fino al completo arresto. Così facendo il dispositivo sarà pronto all'uso.

Svitare il coprilancetta dalla lancetta.

Rimettere il cappuccio al pungidito.

Con il cappuccio potete impostare la profondità di puntura desiderata.



Inserite l'estremità grigia della striscia reattiva nell'apertura del dispositivo di misurazione della glicemia **CONTOUR**<sup>®</sup>.



In tal modo il dispositivo verrà codificato automaticamente!

Il dispositivo si accende. Sul display viene visualizzata una striscia con una goccia di sangue lampeggiante. Ciò indica che il dispositivo è pronto per la misurazione della glicemia.

### Prelievo della goccia di sangue dal polpastrello:

Spingete il pungidito con il cappuccio verso il punto da pungere. Premete il pulsante di attivazione blu.



Spingere dal palmo della mano verso il dito punto, in modo da creare una goccia di sangue. Una minima quantità di 0,6 milionesimo di litro è sufficiente.

### Testare il sangue:


Tenete subito l'apertura di misurazione della striscia reattiva vicina alla goccia di sangue. Il sangue viene aspirato automaticamente dalla striscia reattiva.

**Tenete la striscia reattiva vicina alla goccia di sangue affinché non venga emesso un segnale acustico.**


Con il segnale acustico iniziano i 5 secondi di misurazione. Dopodiché viene visualizzato e salvato automaticamente il risultato di misurazione\*.

Quando, dopo la misurazione toglierete dal **CONTOUR**<sup>®</sup> la striscia reattiva usata, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

\*Il dispositivo di misurazione è stato impostato in modo tale, da visualizzare i risultati in mmol/L. Questa impostazione è fissata nel dispositivo. Se i vostri risultati dovessero apparire in mg/dL, allora rivolgetevi per favore al servizio clienti della Bayer Diabetes Care (Tel. 044 465 83 55).

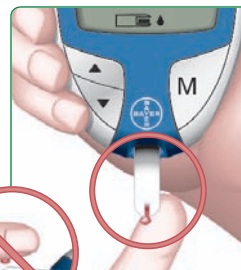

**Misurazione della glicemia al polpastrello**

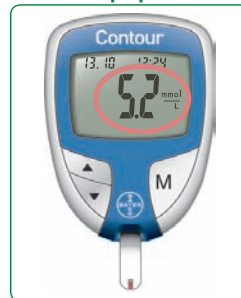

### Rimuovere la lancetta usata:

Tenete il pungidito in una mano e il **pollice nell'apposito spazio**. Con l'altra mano tenete forte il cappuccio **dall'anello di impostazione** e tiratelo attentamente verso il basso.



Poggiate il cappuccio coprilancetta su una superficie piana con il marchio della Bayer verso il basso.

Spingete la lancetta, che ancora si trova nel pungidito, completamente al centro del cappuccio coprilancetta.



Smaltite la lancetta come descritto nella guida all'uso del pungidito.

**In caso di domande, il servizio clienti della Bayer Diabetes Care vi aiuterà volentieri al numero di telefono 044 465 83 55 oppure via e-mail [info@bayerdiabetes.ch](mailto:info@bayerdiabetes.ch). Troverete ulteriori informazioni sulla misurazione della glicemia e sul diabete in generale sul sito internet [www.bayerdiabetes.ch](http://www.bayerdiabetes.ch).**

## Utilizzo del modo esteso (L2) Troverete la descrizione dettagliata nella guida all'uso.

### Impostare nel dispositivo di misurazione il modo esteso

Se volete usare le marcature dei pasti e altre funzioni, potete impostare nel dispositivo il modo esteso con le seguenti indicazioni:

1. Premete **M** per accendere il dispositivo.
2. Premete **▲** oppure **▼** e tenete premuto il tasto per 3 secondi.
3. Sul display lampeggia L-1.
4. Premete **▲** oppure **▼** per sintonizzare il dispositivo su L-2.
5. Premete **M** per salvare l'impostazione.



Scoprirete meglio da soli quali funzioni estese vi aiuteranno nella regolazione della glicemia. Trovate ulteriori informazioni sul sito [www.bayerdiabetes.ch](http://www.bayerdiabetes.ch), presso il servizio clienti della Bayer Diabetes Care oppure dal vostro specialista per il diabete.

### Marcatura del risultato di misurazione

*Troverete la descrizione dettagliata nella guida all'uso.*



**Prima del pasto**  
= Marca il risultato rilevato prima di un pasto.




**Dopo il pasto**  
= Marca il risultato rilevato dopo un pasto.



**Risultato di misurazione fuori dal normale** = Marca risultati che sono fuori dal normale e per i quali forse avete preso nota nel vostro diario del diabete.



**Allarme** = Sintonizzare l'allarme, in modo che esso vi ricordi di effettuare una misurazione della glicemia in una determinata distanza di tempo dal pasto.

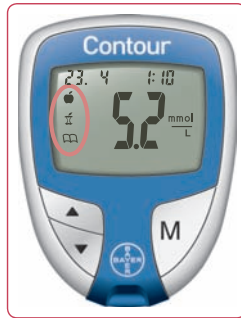

### Dopo la misurazione della glicemia:

Per scegliere tra	Vedete	Attivare	Vedete	Cosa significa	Utilizzare l'ALLARME
<p><b>"Prima del pasto"</b> Premete <b>▲</b> oppure <b>▼</b></p>	 (lampeggia)	Premete <b>M</b>		Il risultato viene marcato come "misurato prima del pasto". Adesso potete impostare un allarme premendo un'altra volta <b>M</b> .**	Quando suona l'allarme, il dispositivo di misurazione si accende automaticamente. Sul display viene indicato il risultato della misurazione effettuata prima del pasto, che avete marcato all'impostazione dell'allarme.  Premendo un tasto qualsiasi spegnete l'allarme. Premendo una seconda volta un tasto qualsiasi spegnete il dispositivo di misurazione. Adesso potete effettuare nuovamente una misurazione della glicemia e marcare il risultato con il  "dopo il pasto" (vedi tabella accanto).
<p><b>"Dopo il pasto"</b> Premete <b>▲</b> oppure <b>▼</b></p>	 (lampeggia)	Premete <b>M</b>		Il risultato viene marcato come "misurato dopo il pasto".	
<p><b>"Risultato di misurazione fuori dal normale"</b> Premete <b>▲</b> oppure <b>▼</b></p>	 (lampeggia)	Premete <b>M</b>		Il risultato viene marcato nella memoria come "valore glicemico fuori dal normale". Dovreste annotarlo nel vostro diario del diabete.	

\*\*L'allarme è preimpostato in modo tale da suonare dopo 2 ore. Troverete nella guida all'uso la descrizione dettagliata su come cambiare l'orario d'allarme.

## Messaggi di errore e soluzioni:

La guida all'uso contiene una completa descrizione dei messaggi di errore.

E1	Temperatura al di fuori della zona di funzionamento.
E2	La striscia reattiva non è completa di sangue. Ripetete la misurazione con una nuova striscia reattiva.
E3	Striscia reattiva usata. Ripetete la misurazione con una nuova striscia reattiva.
E11	Risultato di misurazione non plausibile. Ripetete la misurazione con una nuova striscia reattiva.

Bayer HealthCare

Bayer (Schweiz) AG, Diabetes Care  
Grubenstrasse 6, Casella postale  
CH-8045 Zurigo  
Hotline: 044 465 83 55  
E-Mail: [info@bayerdiabetes.ch](mailto:info@bayerdiabetes.ch)  
Fax: 044 465 82 82  
Internet: [www.bayerdiabetes.ch](http://www.bayerdiabetes.ch)

Bayer Consumer Care AG  
Postfach  
4002 Basel, Switzerland

Bayer, la croce Bayer, *CONTOUR*, *MICROLET*,  
Codifica automatica e il logo Codifica  
Automatica sono marchi della Bayer.

0088

Bayer

N1090D  
Rev. 7/08