


**BAYER**  
**Contour**<sup>®</sup>  
 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL




**SNABBGUIDE**

## CONTOUR<sup>®</sup>-mätaren:

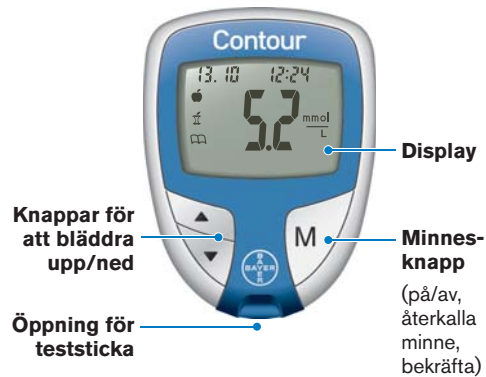

## CONTOUR<sup>®</sup>-teststickan:

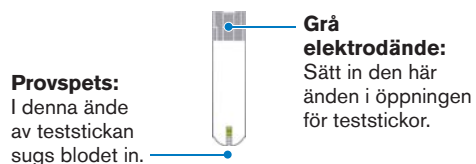


## Grundläggande testning

Fullständiga instruktioner finns i bruksanvisningen till CONTOUR<sup>®</sup> och bipacksedeln till MICROLET<sup>®</sup> 2.

### Förbereda för test:

Ta bort munstycket från blodprovstagaren MICROLET<sup>®</sup> 2.

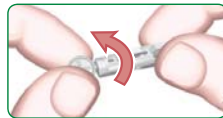

Lossa (utan att avlägsna) den runda skyddshatten på en lansett genom att vrida den en fjärdedels varv.

Sätt in lansetten bestämt för att ladda enheten.

Vrid av lansettens skyddshatt.

Sätt tillbaka munstycket.

Justera munstycket för att åstadkomma önskat stickdjup.



För in teststickans grå ände i mätarens öppning för teststickor.



Ingen kodning behövs.

Mätaren startar och en teststicka med en blinkande bloddroppe visas på mätarens display för att indikera att mätaren är redo för testet.

### Få fram bloddroppen:

Håll munstycket mot huden med ett bestämt tryck och tryck med tummen på den blå utlösarknappen.




Stryk på handen och fingret i riktning mot stickstället för att få fram en bloddroppe.

### Utföra ett test:

Håll teststickans spets mot bloddroppen. Blodet sugts in i teststickan.

Håll kvar teststickan i bloddroppen tills mätaren piper.

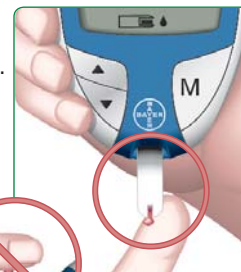


Test på fingertopp

Mätresultatet\* visas efter att mätaren har räknat ner i fem sekunder.

Stäng av mätaren genom att ta ur teststickan.

\*Mätaren är förinställd så att den visar mätresultat i mmol/L. Kontakta Bayers kundtjänst på telefon 020-83 00 84 om resultatet visas i mg/dL.

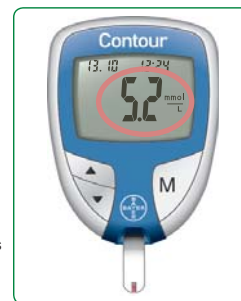

### Avlägsna den använda lansetten:

Håll blodprovstagaren i ena handen med tummen på **greppet**, och ta tag i det **grå munstycket** enligt bilden. Dra försiktigt loss munstycket.



Placera lansettens runda skyddshatt på en plan yta med Bayer-logotypen nedåt.



Låt lansetten sitta kvar i blodprovstagaren och tryck in lansett nålen helt och hållet i mitten av skyddshattens frilagda sida.

Avlägsna lansetten ur blodprovstagaren enligt instruktionerna i blodprovstagaren bipacksedel.

**Behöver du hjälp?**

**Ring Bayers kundsupport: 020-83 00 84**

**www.bayerdiabetes.se**

## Använda läget för avancerade funktioner

Fullständiga instruktioner finns i bruksanvisningen.

### Sätta mätaren i avancerat läge

Så här sätter du din mätare i avancerat läge för att kunna använda måltidsmarkörer och andra tillgängliga funktioner:

1. Tryck på **M** för att starta mätaren.
2. Tryck in och håll nere **▲** eller **▼** i tre sekunder.
3. L-1 blinkar.
4. Tryck på **▲** eller **▼** för att byta läge till L-2.
5. Spara genom att trycka på **M**.



### Använda markörerna

Fullständiga instruktioner finns i bruksanvisningen.



**Före måltid** = Markerar testresultatet av en mätning före måltid.




**Efter måltid** = Markerar testresultatet av en mätning efter måltid.



**Loggbok** = Markerar resultatet som avvikande.



**Larm** = Ställer in ett larm för att påminna dig att utföra en mätning efter måltid.

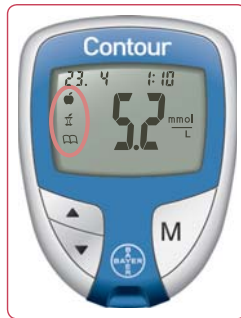

Ta reda på hur dessa extrafunktioner kan hjälpa dig hantera din diabetes. Gå till [www.bayerdiabetes.se](http://www.bayerdiabetes.se) eller ring till Bayers kundsupport:

**020-83 00 84**

### När ditt resultat visas på displayen efter utfört test:

MARKERA	INDIKERING	BE-KRÄFTA	INDIKERING	FÖRKLARING	ANVÄNDA LARMET
<b>Före måltid</b> Tryck på <b>▲</b> eller <b>▼</b>		Tryck på <b>M</b>		Resultatet markeras som före måltid. Tryck på <b>M</b> en gång till för att ställa in ett larm.**	<p>När larmet ljuder startar mätaren och visar ditt resultat före måltid.</p> <p>Tryck på valfri knapp en gång för att stänga av larmet och två gånger för att stänga av mätaren.</p> <p>Gör ytterligare ett test och markera det med en symbol för mätning efter måltid  (se tabellen till vänster).</p>
<b>Efter måltid</b> Tryck på <b>▲</b> eller <b>▼</b>		Tryck på <b>M</b>		Resultatet markeras som efter måltid.	
<b>Loggbok</b> Tryck på <b>▲</b> eller <b>▼</b>		Tryck på <b>M</b>		Resultatet markeras i minnet som avvikande. Du bör notera detta i din dagbok.	

\*\*Larmet är fabriksinställt till 2 timmar. Fullständiga instruktioner för justering av larmtider finns i bruksanvisningen.

## Felkoder och symboler

En fullständig lista över felkoder finns i bruksanvisningen.

<b>E1</b>	Temperatur utanför tillåtet intervall.
<b>E2</b>	Teststickan har inte fyllts tillräckligt. Gör om testet med en ny teststicka.
<b>E3</b>	Teststickan är använd. Gör om testet med en ny teststicka.
<b>E11</b>	Avvikande testresultat. Gör om testet med en ny teststicka.



Bayer HealthCare

Bayer HealthCare  
Diabetes Care  
Box 606  
169 26 Solna  
SVERIGE  
Tel: 020-83 00 84  
Fax: 020-83 00 94  
[www.bayerdiabetes.se](http://www.bayerdiabetes.se)



Bayer Consumer Care AG  
Postfach  
4002 Basel, Switzerland

Bayer, Bayer-korset, *CONTOUR*, *MICROLET*, Ingen Kodning och Ingen Kodning-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bayer.



Bayer

N1095E  
Rev. 6/08