


BAYER
Contour[®]
 SYSTEM TIL OVERVÅGNING AF BLODSUKKER




KORT VEJLEDNING

CONTOUR[®]-apparatet:

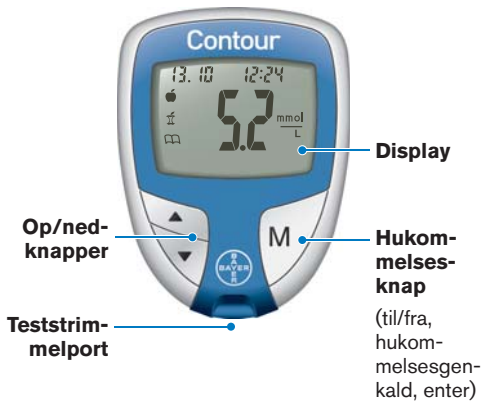

CONTOUR[®]-teststrimmel:

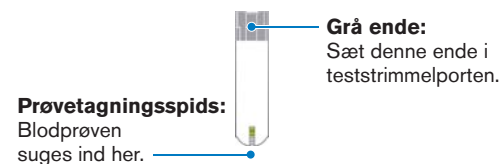

Sådan måler du

De komplette instruktioner findes i brugervejledningen til dit CONTOUR[®]-apparat og i den vedlagte indlægsseddel til MICROLET[®] 2-fingerprikkeren.

Klargøring til måling:

Tag endehætten af MICROLET[®] 2-fingerprikkeren.



Løsn den runde beskyttelseshætte på en lancet ved at dreje den 1/4 omgang, men tag ikke hættten af.

Indfør lancetten, til den ikke kan komme længere. Derved "spændes" enheden.

Drej hættten af lancetten.

Sæt endehætten på fingerprikkeren igen.

Vælg den indstilling på endehættens drejeknap, der svarer til den ønskede stikkedybde.



Sæt den grå ende af teststrimlen i teststrimmelporten på apparatet.



Kodning er ikke nødvendig!

Apparatet tænder, og der vises en teststrimmel med en blinkende bloddråbe i displayet for at angive, at apparatet er klar til måling.

Sådan får du bloddråben frem:


Pres endehætten godt mod indstiksstedet, og tryk på den blå udløserknap med tommelfingeren.



Gnid en finger hen mod indstiksstedet for at danne en bloddråbe.

Måling af blodsukkerniveauet:

Lad spidsen af teststrimlen berøre bloddråben. Blodet suges ind i teststrimlen.

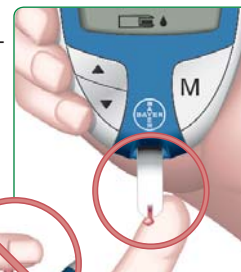

Hold teststrimlens spids i bloddråben, indtil apparatet bipper.




Fingerspidsmåling

Dit måleresultat* vises efter 5 sekunders nedtælling.

Apparatet slukkes ved at fjerne teststrimlen.

*Dit apparat er forudindstillet og låst til at vise resultaterne i mmol/L. Hvis dit resultat vises i mg/dL, kontakt da Bayers kundeservice på +45 45 23 50 37.

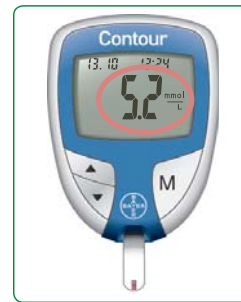

Sådan fjernes den brugte lancet:

Hold fingerprikkeren i den ene hånd med tommelfingeren på **enhedens fordybning**, og tag med den anden hånd fat i **drejeknappen på den grå endehætte** som vist. Træk forsigtigt endehætten af.



Anbring lancettens runde beskyttelseshætte på en plan overflade med Bayer-logoet vendt nedad.



Lad den brugte lancet sidde i fingerprikkeren, og tryk lancetnålen helt ind i midten af den frie side af hættten.

Frigør lancetten ved at følge instruktionerne i indlægssedlen til fingerprikkeren.

Har du brug for hjælp?
Bayer Kundeservice: 45 23 50 37
www.bayerdiabetes.dk

MÅLTIDS-MARKERING

INGEN KODNING

Anvendelse af avanceret brugerniveau De komplette instruktioner findes i brugervejledningen.

Indstilling af apparatet til avanceret brugerniveau

For at indstille dit apparat til avanceret brugerniveau og have fordel af måltidsmarkører og andre tilgængelige funktioner:

1. Tryk på **M** for at tænde apparatet.
2. Tryk på knappen **▲** eller **▼**, og hold den inde i 3 sekunder.
3. L-1 vil blinke.
4. Tryk på **▲** eller **▼** for at skifte til L-2.
5. Tryk på **M** for at gemme indstillingen.



Brug af markørerne

De komplette instruktioner findes i brugervejledningen.



Før måltid = markerer et resultat, der blev målt før et måltid.




Efter måltid = markerer et resultat, der blev målt efter et måltid.



Logbog = markerer et resultat som værende unikt eller anderledes.





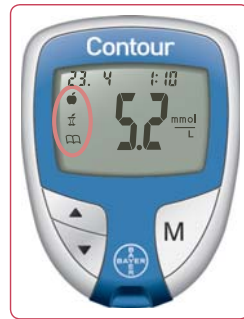





Alarm = indstiller en alarm for at minde dig om at foretage en måling efter et måltid.



Find ud af, hvordan disse ekstra funktioner kan hjælpe dig med at kontrollere din diabetes. Besøg www.bayerdiabetes.dk, eller ring til Bayers kundeservice:

45 23 50 37




Efter at du har foretaget en måling og ser dit resultat på displayet:

FOR AT VÆLGE	VISNING	FOR AT INDSTILLE	VISNING	BETYDNING	BRUG AF ALARMEN
Før måltid Tryk på ▲ eller ▼	 (Blinker)	Tryk på M		Resultatet er markeret som en måling før et måltid. Tryk på M igen for at indstille en alarm.**	Når alarmen lyder, tænder apparatet, og du vil se dit resultat før måltid. 
Efter måltid Tryk på ▲ eller ▼	 (Blinker)	Tryk på M		Resultatet er markeret som en måling efter et måltid.	Tryk én gang på en tilfældig knap for at stoppe alarmen og to gange for at slukke apparatet.
Logbog Tryk på ▲ eller ▼	 (Blinker)	Tryk på M		Resultatet er markeret i hukommelsen som unikt. Noter dette resultat i din Bayer Diabetesdagbog.	Foretag en ny blodsuktermåling, og marker den med markøren for efter måltid  (se diagrammet til venstre).

**Alarmen er fabriksindstillet til aktivering efter 2 timer. Se udførlige instruktioner til indstilling af, hvornår alarmen skal aktiveres, i brugervejledningen.

Fejlkode og -symboler

En komplet liste over fejlkode findes i brugervejledningen.

E1 	Temperaturen er uden for det anbefalede område.
E2 	Teststrimlen er ikke fyldt tilstrækkeligt. Gentag målingen med en ny teststrimmel.
E3 	Apparatet registrerer en brugt teststrimmel. Gentag målingen med en ny teststrimmel.
E11	Unormalt resultat. Gentag målingen med en ny teststrimmel.



Bayer HealthCare

Bayer A/S
Diabetes Care
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4523 5000
www.bayerdiabetes.dk



Bayer Consumer Care AG
Postfach
4002 Basel, Switzerland

Bayer, Bayer-korset, CONTOUR, MICROLET, Ingen Kodning og Ingen Kodning-logoet er varemærker tilhørende Bayer.



Bayer

N1096D
Rev. 6/08