


BAYER
Contour[®]
MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER




LOMMEGUIDE

CONTOUR[®] blodsukkerapparat

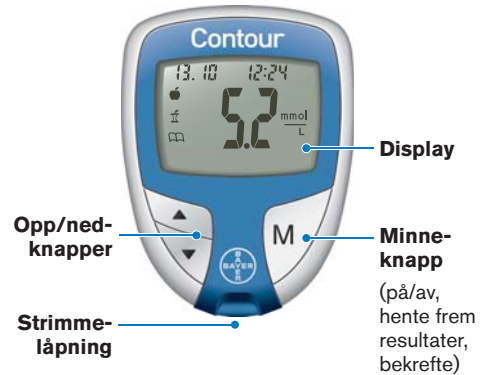

CONTOUR[®] blodsukkerstrimmel

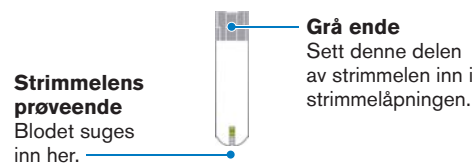

Vanlig blodsuktermåling

Brukerveiledningen for **CONTOUR**[®] og pakningsvedlegget for **MICROLET**[®] 2 inneholder fullstendige instruksjoner.

Klargjøring før måling

Fjern munnstykket fra **MICROLET**[®] 2 stikkepenen.



Løsne den runde beskyttelseshetten på en lansett en kvart omdreining, men ikke ta den av.

Sett lansetten godt inn for å tilbake stille mekanismen.

Vri av hetten på lansetten.



Sett på plass munnstykket.

Juster innstillingshjul på munnstykket til ønsket innstilling for stikkedybde.



Sett den grå enden av blodsukkerstrimmelen inn i strimmelåpningen på apparatet.



Ingen koding er nødvendig.

Apparatet slår seg på, og en blodsukkerstrimmel med en blinkende bloddråpe vises i displayet. Dette betyr at apparatet er klart til bruk.

Få frem bloddråpen

Trykk munnstykket fast mot stikkestedet, og trykk på den blå utløserknappen med tommelen.




Stryk hånden og fingeren mot stikkestedet for å få frem en bloddråpe.

Måle blodsukkeret

Plasser enden av blodsukkerstrimmelen inntil bloddråpen. Blodet suges inn i strimmelen.

Hold strimmelen i dråpen til apparatet avgir et lydsignal.

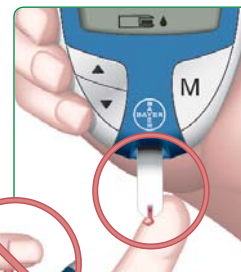


Måling på fingertuppen

Resultatet* vises etter en nedtelling på 5 sekunder.

Apparatet slås av ved å ta ut blodsukkerstrimmelen.

*Apparatet er forhåndsinnstilt og låst til å vise resultatene i mmol/L. Hvis resultatet vises i mg/dL, kontakter du Bayer Diabetes Care kundeservice på 24 11 18 00.

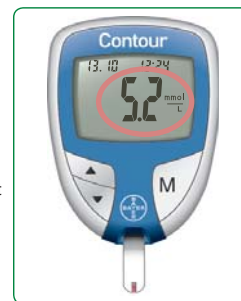

Ta ut den brukte lansetten

Hold stikkepenen med tommelen på grepsfordypingen med en hånd, med den andre hånden holder du det **grå munnstykket** som vist. Dra munnstykket forsiktig av.



Plasser den runde lansetthetten på et flatt underlag med Bayerlogoen vendt ned.



Mens den brukte lansetten fremdeles er i stikkepenen, trykker du lansettnålen helt inn i midten av den eksponerte siden av hetten.

Trykk ut lansetten i henhold til instruksjonene i pakningsvedlegget for stikkepenen.

Trenger du hjelp?

Bayer Diabetes Care kundeservice: 24 11 18 00

www.bayerdiabetes.no

Bruke avansert modus Se brukerveiledningen for å få fullstendige instruksjoner.

Innstille apparatet i avansert modus

Slik innstiller du apparatet i avansert modus slik at du kan bruke måltidsmarkering og andre tilgjengelige funksjoner:

1. Trykk på **M** for å slå på apparatet.
2. Trykk på og hold nede **▲** eller **▼** i 3 sekunder.
3. L-1 blinker.
4. Trykk på **▲** eller **▼** for å endre til L-2.
5. Trykk på **M** for å bekrefte.



Finn ut hvordan disse tilleggsfunksjonene kan hjelpe deg med å få bedre blodsukkerkontroll. Gå til www.bayerdiabetes.no eller ring Bayer Diabetes Care kundeservice på tlf.

24 11 18 00.

Bruke merking av resultater

Se brukerveiledningen for å få fullstendige instruksjoner.



Før måltid = Merker resultatet av en måling som er tatt før et måltid.




Etter måltid = Merker resultatet av en måling som er tatt etter et måltid.



Dagbok = Merker resultatet som unikt eller avvikende.



Alarm = Innstiller en alarm som minner deg om å gjøre en måling etter et måltid.

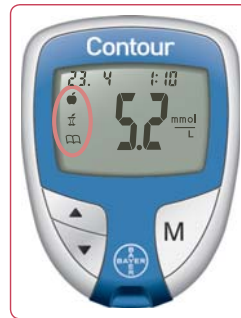

Når du har gjort en måling og ser resultatene i displayet

FOR Å MERKE RESULTATER	SER DU	FOR Å INNSTILLE	DU VIL SE HVA	DET BETYR	BRUKE ALARMEN
Før måltid Trykk på ▲ eller ▼		Trykk på M		Resultatet merkes som en måling som er gjort før et måltid. Trykk en gang til på M for å innstille en alarm.**	Når alarmen går, slås apparatet på, og du vil se resultatet av målingen som er gjort før et måltid.
Etter måltid Trykk på ▲ eller ▼		Trykk på M		Resultatet merkes som en måling som er gjort etter et måltid.	Trykk en gang på en hvilken som helst knapp for å dempe alarmen, trykk to ganger for å slå av apparatet.
Dagbok Trykk på ▲ eller ▼		Trykk på M		Resultatet merkes i minnet som unikt. Du bør notere dette i dagboken.	Gjør en annen måling og merk den med symbolet for en måling utført etter et måltid (se diagrammet til venstre).

**Alarmen er fra fabrikk innstilt på 2 timer. Brukerveiledningen inneholder fullstendige instruksjoner om hvordan du justerer alarmtidene.

Feilkoder og symboler

Brukerveiledningen inneholder en komplett liste over feilkoder.

E1	Feil temperaturområde.
E2	Det har oppstått et problem i forbindelse med fylling av blodsukkerstrimmelen. Gjør en ny måling med en ny blodsukkerstrimmel.
E3	Apparatet har registrert en brukt blodsukkerstrimmel. Gjør en ny måling med en ny blodsukkerstrimmel.
E11	Unormalt resultat. Gjør en ny måling med en ny blodsukkerstrimmel.



Bayer HealthCare

Bayer A/S, Diabetes Care
Drammensveien 147 B
Postboks 14
NO-0212 Oslo
Telefon: 24 11 18 00
www.bayerdiabetes.no



Bayer Consumer Care AG
Postfach
4002 Basel, Switzerland

Bayer, Bayer-korset, *CONTOUR*, *MICROLET*, Ingen Koding og Ingen Koding-logoen er varemerker for Bayer.



Bayer

N1096D
Rev. 6/08