


BAYER
Contour[®]

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

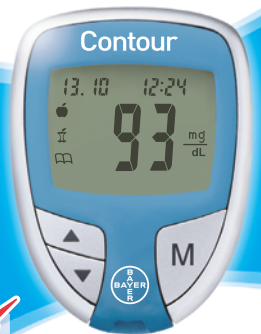

ΧΩΡΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ™

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ο Μετρητής σας **CONTOUR**[®]:



Η Ταινία Μέτρησης **CONTOUR**[®]:



Βασική Μέτρηση

Ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήστη **CONTOUR**[®] και το ένθετο **MICROLET**^{®2} για πλήρεις οδηγίες. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή τρυπήματος προορίζεται για χρήση από ένα μόνο ασθενή.**

Προετοιμασία για τη Μέτρηση:

Αφαιρέστε το καπάκι της συσκευής τρυπήματος **MICROLET2**.



Χαλαρώστε το στρογγυλό προστατευτικό πώμα μίας βελόνας περιστρέφοντάς το κατά ¼, αλλά μην το αφαιρέσετε.



Εισάγετε σταθερά τη βελόνα για να επαναφέρετε τη συσκευή.



Ξεβιδώστε το πώμα της βελόνας.




Τοποθετήστε ξανά το καπάκι.



Ρυθμίστε τον πίνακα ενδείξεων στο καπάκι στη ρύθμιση που επιθυμείτε σχετικά με το βάθος τρυπήματος.



Εισάγετε το γκρι άκρο της ταινίας μέτρησης στη θύρα εισαγωγής της ταινίας μέτρησης στον μετρητή.

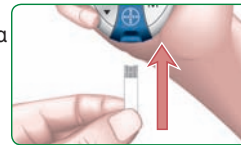

Δεν απαιτείται κωδικοποίηση.

Ο μετρητής θα τεθεί σε λειτουργία και μία ταινία μέτρησης με μία σταγόνα αίματος που αναβοσβήνει θα εμφανιστεί στην οθόνη του μετρητή σας, ενημερώνοντάς σας ότι ο μετρητής είναι έτοιμος να εκτελέσει μέτρηση.

Λήψη της Σταγόνας Αίματος:

Πιέστε σταθερά το καπάκι στο σημείο τρυπήματος και πιέστε το μπλε πλήκτρο απελευθέρωσης με τον αντίχειρά σας.




Σπρώξτε το χέρι και το δάχτυλό σας προς το σημείο τρυπήματος για να σχηματιστεί μία σταγόνα αίματος.

Μέτρηση του Αίματός σας:

Ακουμπήστε το άκρο της ταινίας μέτρησης στη σταγόνα του αίματος. Το αίμα εισχωρεί στην ταινία μέτρησης.


Κρατήστε την ταινία σε επαφή με τη σταγόνα του αίματος έως ότου ο μετρητής εκπέμψει έναν χαρακτηριστικό ήχο.

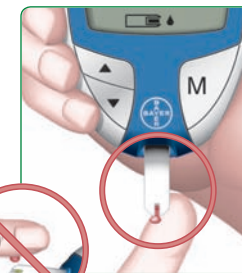

Μέτρηση στα Ακροδάχτυλα

Το αποτέλεσμα σας* εμφανίζεται στην οθόνη μετά από μία αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων.

Για να θέσετε τον μετρητή σας εκτός λειτουργίας, αφαιρέστε την ταινία μέτρησης.

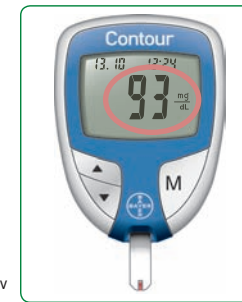

*Ο μετρητής σας έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων και είναι κλειδωμένος να εμφανίζει τα αποτελέσματα σε mg/dL. Εάν το αποτέλεσμά σας εμφανίζεται σε mmol/L, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Bayer στο 801 11 40 200.

Αφαίρεση της χρησιμοποιημένης βελόνας:

Με το ένα χέρι, κρατήστε τη συσκευή τρυπήματος με τον αντίχειρά σας στην εσοχή της χειρολαβής, και με το άλλο χέρι σας, κρατήστε τον γκρι πίνακα ενδείξεων που βρίσκεται στο καπάκι όπως φαίνεται. Αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι.



Τοποθετήστε το στρογγυλό προστατευτικό πώμα της βελόνας σε μία επίπεδη επιφάνεια με το λογότυπο της Bayer να κοιτάζει προς τα κάτω.



Με τη χρησιμοποιημένη βελόνα να εξακολουθεί να βρίσκεται στη συσκευή τρυπήματος, σπρώξτε τη βελόνα εντελώς στο μέσο της εκτεθειμένης πλευράς του πώματος.

Εξάγετε τη βελόνα ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο ένθετο της συσκευής τρυπήματος.

Χρειάζεστε Βοήθεια; Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Bayer: 801 11 40 200 www.bayerdiabetes.com

Χρήση της Προηγμένης Κατάστασης Λειτουργίας

Ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήστη για πλήρεις οδηγίες.

Ρύθμιση του Μετρητή σας στην Προηγμένη Κατάσταση Λειτουργίας

Για να ρυθμίσετε τον μετρητή σας στην Προηγμένη Κατάσταση Λειτουργίας και να επωφεληθείτε από γευματικές ενδείξεις και άλλα διαθέσιμα χαρακτηριστικά:

1. Πιέστε **M** για να θέσετε τον μετρητή σας σε λειτουργία.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **▲** ή το πλήκτρο **▼** για 3 δευτερόλεπτα.
3. Θα εμφανιστεί η ένδειξη L-1.
4. Πιέστε **▲** ή **▼** για να αλλάξετε την ένδειξη σε L-2.
5. Πιέστε **M** για να εκτελέσετε τη ρύθμιση.



Ανακαλύψτε πώς αυτά τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά μπορούν να σας βοηθήσουν στη διαχείριση του διαβήτη σας. Επισκεφθείτε το www.bayerdiabetes.com ή καλέστε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Bayer:

801 11 40 200

Χρήση των Ενδείξεων

Ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήστη για πλήρεις οδηγίες.



Προγευματικό = Επισημαίνει ένα αποτέλεσμα μέτρησης που ελήφθη πριν από ένα γεύμα.




Μεταγευματικό = Επισημαίνει ένα αποτέλεσμα μέτρησης που ελήφθη μετά από ένα γεύμα.



Ημερολόγιο = Επισημαίνει οποιοδήποτε αποτέλεσμα ως μοναδικό ή διαφορετικό με κάποιο τρόπο.



Ειδοποίηση = Ρυθμίζει μία ειδοποίηση για να σας υπενθυμίσει να εκτελέσετε μία μεταγευματική μέτρηση.

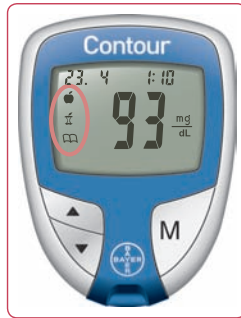

Αφού εκτελέσετε μία μέτρηση και δείτε τα αποτελέσματά σας στην οθόνη:

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΘΑ ΔΕΙΤΕ	ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ	ΘΑ ΔΕΙΤΕ	ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ	ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προγευματικό Πιέστε ▲ ή ▼	(Αναβοσβήνει)	Πιέστε M		Το αποτέλεσμα έχει επισημανθεί ως προγευματική μέτρηση. Πιέστε Ξανά M για να ρυθμίσετε μία ειδοποίηση.**	Όταν ακουστεί η ειδοποίηση, ο μετρητής τίθεται σε λειτουργία και θα δείτε το αποτέλεσμα της προγευματικής σας μέτρησης. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο μία φορά για να σιγήσετε την ειδοποίηση και δύο φορές για να θέσετε τον μετρητή εκτός λειτουργίας. Εκτελέστε άλλη μία μέτρηση αίματος και επισημαίνετε την με μία ▲ μεταγευματική ένδειξη (βλ. διάγραμμα στα αριστερά).
Μεταγευματικό Πιέστε ▲ ή ▼	(Αναβοσβήνει)	Πιέστε M		Το αποτέλεσμα έχει επισημανθεί ως μεταγευματική μέτρηση.	
Ημερολόγιο Πιέστε ▲ ή ▼	(Αναβοσβήνει)	Πιέστε M		Το αποτέλεσμα έχει επισημανθεί στη μνήμη ως μοναδικό. Θα πρέπει να το σημειώσετε αυτό στο Ημερολόγιο Clinilog® της Bayer.	

**Η ειδοποίηση είναι εργαστηριακά ρυθμισμένη στις 2 ώρες. Ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήστη για πλήρεις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των χρόνων ειδοποίησης.

Κωδικοί και Σύμβολα Σφαλμάτων

Ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήστη για έναν πλήρη κατάλογο των Κωδικών Σφαλμάτων.

E1	Θερμοκρασία εκτός εύρους.
E2	Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα και δεν γέμισε πλήρως η ταινία μέτρησης. Επαναλάβετε τη μέτρηση χρησιμοποιώντας μία νέα ταινία μέτρησης.
E3	Ο μετρητής έχει ανιχνεύσει μία χρησιμοποιημένη ταινία μέτρησης. Επαναλάβετε τη μέτρηση χρησιμοποιώντας μία νέα ταινία μέτρησης.
E11	Μη φυσιολογικό αποτέλεσμα. Επαναλάβετε τη μέτρηση χρησιμοποιώντας μία νέα ταινία μέτρησης.



Bayer HealthCare

Bayer Ελλάς ABEE
Diabetes Care
Σωρού18-20
15125 Μαρούσι
Τμήμα Πελατών τηλ.
210 6187707
Ανοιχτή γραμμή διαβήτη
801 11 40 200

Bayer Consumer Care AG
Postfach
4002 Basel, Switzerland



0088
Bayer

Τα σήματα Bayer, Σταυρός της Bayer (Bayer Cross), CONTOUR, MICROLET, No Coding, καθώς και το λογότυπο No Coding, είναι εμπορικά σήματα της Bayer.

N1133D
Rev. 10/08