

**BAYER**  
**Contour**<sup>®</sup>  
SUSTAV ZA PRAĆENJE RAZINE GLUKOZE U KRVI




**BEZ KODIRANJA**

**BRZI VODIČ S REFERENCAMA**

Vaš **CONTOUR**<sup>®</sup> instrument za samokontrolu:



Vaša **CONTOUR**<sup>®</sup> test traka:

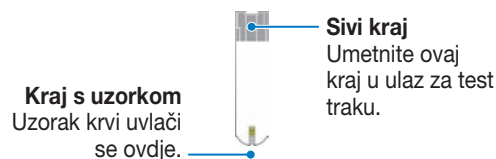

## Osnovno testiranje

Pogledajte svoje **CONTOUR**<sup>®</sup> Upute za korištenje i **MICROLET**<sup>®</sup> 2 umetak za potpune upute. **OPREZ:** Uređaj za uzimanje uzorka krvi namijenjen je isključivo za osobnu uporabu.

### Pripreme za testiranje:

Uklonite pokrov s **MICROLET2** uređaja za uzimanje uzorka krvi.



Olabavite zaštitni čep na lanceti rotirajući ga ¼ okreta, ali ne uklanjajte ga.



Čvrsto umetnite lancetu kako biste ponovno složili uređaj.



Odvrnite zaštitni čep lancete.



Ponovno namjestite vrh lancetara.



Podesite regulator dubine uboda na postavku dubine uboda koja vam odgovara.



Umetnite sivi kraj test trake u otvor za test traku na instrumentu za samokontrolu.



Nije potrebno kodiranje.

Instrument će se uključiti i test traka sa svjetlećom kapljicom krvi će se pojaviti na zaslonu što je oznaka da je instrument spreman za testiranje.

### Dobivanje kapljice krvi:

Snažno pritisnite vrh lancetara na mjesto uboda i pritisnite palcem plavu tipku za otpuštanje.



Pritišćite ruku i prst prema mjestu uboda da biste stvorili kapljicu krvi.

### Testiranje krvi:

Priljubite vrh test trake na kapljicu krvi. Krv je uvučena u test traku.

Držite na kapljici krvi dok instrument za samokontrolu ne da zvučni signal.




Testiranje uzorka krvi iz jagodice prsta

Vaš rezultat\* prikazuje se nakon odbrojavanja 5 sekundi.

Da biste isključili svoj instrument, uklonite test traku.

\*Vaš instrument je unaprijed i konačno postavljen da pokazuje rezultate u mmol/L. Ako je vaš rezultat u mg/dL, kontaktirajte Korisničku službu za dijabetes tvrtke Bayer za RH, tvrtku MEDiLAB na 00385/1/235-6730.

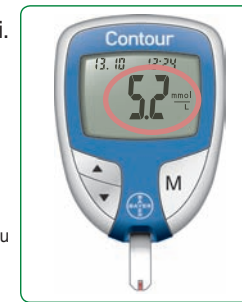

### Uklanjanje iskorištenih lanceta:

U jednoj ruci držite uređaj za uzimanje uzorka krvi, s palcem na urezu drška, a drugom rukom držite regulator dubine uboda vrha lancetara, kako je prikazano. Nježno uklonite vrh lancetara.



Stavite zaštitni čep lancete na ravnu površinu s Bayerovim logom prema dolje.

S iskorištenom lancetom još u uređaju, gurnite iglu lancete u središte čepa.



Otpustite lancetu slijedeći upute u prilogu koji ste dobili uz lancetar.

Trebate pomoć? Bayerova korisnička služba za RH:  
Tvrtka MEDiLAB 00385/1/235-6730  
[www.bayerdiabetes.com](http://www.bayerdiabetes.com)

## Korištenje „Dodatnih mogućnosti“

Pogledajte svoje Upute za korištenje za potpune upute.

### Postavite svoj instrument za samokontrolu na „Dodatne mogućnosti“

Kako biste postavili instrument na „Dodatne mogućnosti“ i iskoristili mogućnosti označavanja obroka i druge dostupne mogućnosti;

1. Pritisnite **M** da uključite instrument.
2. Pritisnite i držite **▲** ili **▼** 3 sekunde.
3. L-1 će zasvijetliti.
4. Pritisnite **▲** ili **▼** da promijenite na L-2.
5. Pritisnite **M** za postavljanje.



Otkrijte kako vam ove dodatne mogućnosti mogu pomoći da kontrolirate svoj dijabetes. Posjetite [www.bayerdiabetes.com](http://www.bayerdiabetes.com) ili nazovite Bayerovu korisničku službu za RH, tvrtku MEDiLAB na 00385/1/235-6730.

### Korištenje oznaka

Pogledajte svoje Upute za korištenje za potpune upute.



**Prije obroka** = Označava rezultat testa koji je obavljen prije obroka.




**Poslije obroka** = Označava rezultat testa koji je obavljen poslije obroka.



**Logbook (dnevnik)** = Označava bilo kakav rezultat koji je jedinstven ili različit na neki način.



**Alarm** = Postavlja alarm da vas podsjeti na testiranje nakon obroka.

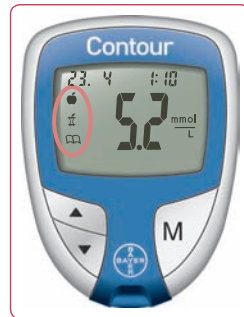

### Nakon što obavite test i vidite svoje rezultate na zaslonu:

ZA OZNAČAVANJE REZULTATA	VIDJET ĆETE	ZA POSTAVLJANJE	VIDJET ĆETE	ŠTO TO ZNAČI	KORIŠTENJE ALARMA
<b>Prije obroka</b> Pritisnite <b>▲</b> ili <b>▼</b>		Pritisnite <b>M</b>		Rezultat je označen kao test obavljen prije obroka. Pritisnite <b>M</b> ponovno da biste postavili alarm.**	Kad se oglasi alarm, instrument se uključi, i vidjet ćete rezultate testa prije obroka.  Pritisnite bilo koju tipku jednom da utišate alarm i dvaput da isključite instrument. Testirajte ponovno i označite  oznakom testa poslije obroka (pogledajte kartu lijevo).
<b>Poslije obroka</b> Pritisnite <b>▲</b> ili <b>▼</b>		Pritisnite <b>M</b>		Rezultat je označen kao test obavljen poslije obroka.	
<b>Logbook (dnevnik)</b> Pritisnite <b>▲</b> ili <b>▼</b>		Pritisnite <b>M</b>		Rezultat je u memoriji označen kao jedinstven. Trebali biste ga zapisati u svoj dnevnik samokontrole.	

\*\*Alarm je tvornički postavljen na 2 sata. Pogledajte Upute za korištenje za potpune upute o tome kako prilagoditi vremena alarma.

## Kodovi i simboli pogrešaka

Pogledajte svoje Upute za korištenje za kompletnan popis kodova pogrešaka.

<b>E1</b>	Temperatura izvan raspona.
<b>E2</b>	Postoji problem nepotpunog punjenja test trake. Ponovite test koristeći novu test traku.
<b>E3</b>	Instrument je prepoznao korištenu test traku. Ponovite test koristeći novu test traku.
<b>E11</b>	Besmislen rezultat. Ponovite test koristeći novu test traku.



**Bayer HealthCare**

MEDiLAB  
Hondlova 2/9, 10 000 Zagreb  
tel. +385 1 2356 730  
fax. +385 1 2356 700  
Republika Hrvatska

Bayer Consumer Care AG  
Postfach  
4002 Basel, Switzerland

Bayer, Bayerov križ, CONTOUR, MICROLET, No Coding i No Coding logo su zaštitni znakovi Bayera.

**Bayer**



N1139D  
Rev. 10/08