



BAYER
Contour[®]
BLOEDGLUCOSEMEETSISTEEM

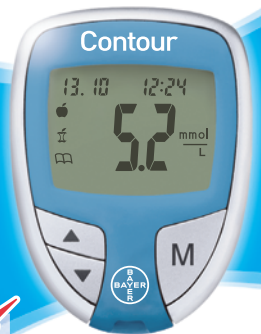


KORTE HANDLEIDING

Uw **CONTOUR**[®] Meter:

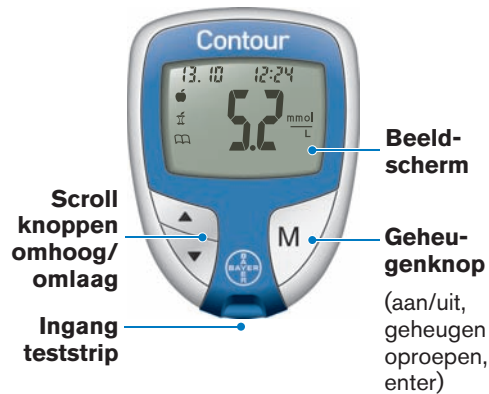

Uw **CONTOUR**[®] Teststrip:

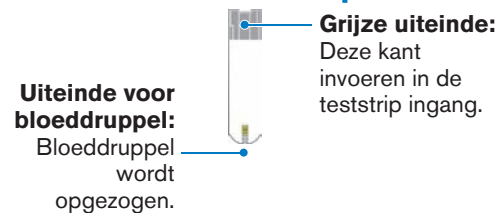

Basis testen


Raadpleeg uw **CONTOUR**[®] gebruiksaanwijzing en **MICROLET**[®]2 bijsluiters voor volledige instructies. **LET OP: Het prikapparaat is bedoeld voor gebruik door één enkele persoon.**

Beginnen met testen:

Verwijder de punctiedop van het **MICROLET**[®]2 prikapparaat.



Draai het beschermingsdopje van het lancet een kwart slag om, verwijder het niet.

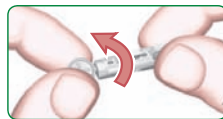

Duw het lancet stevig in het prikapparaat.



Draai het beschermingsdopje van het lancet af.



Plaats de punctiedop terug.



Stel de punctiedop in op de door u gewenste prikdiepte.



Voer het grijze uiteinde van de teststrip in de teststrip ingang van de meter in.



Coderen is niet nodig.

De meter schakelt automatisch in. Een teststrip met een knipperende bloeddruppel in het beeldscherm laat u weten dat de meter klaar is om te testen.

Een bloeddruppel verkrijgen:


Duw de punctiedop stevig op de prikplaats en druk met uw duim op de blauwe vrijgaveknop.



Wrijf uw hand en vinger in de richting van de prikplaats om een bloeddruppel te verkrijgen.

Uw bloed testen:

Houd het uiteinde van de teststrip tegen de bloeddruppel. Het bloed wordt door de teststrip opgezogen.

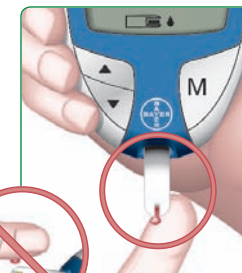


Houd de teststrip in de bloeddruppel totdat de meter een pieptoon geeft.



Testen op de vingertop

Uw testresultaat* verschijnt na 5 seconden op het beeldscherm.

Door de teststrip te verwijderen, schakelt u de meter uit.

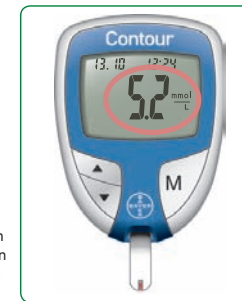

*Uw meter is vooraf ingesteld en vergrendeld, zodat de testresultaten worden weergegeven in mmol/L. Als de resultaten worden weergegeven in mg/dL, neem dan contact op met de klantenservice van Bayer 0800 235 22937.

Een gebruikt lancet verwijderen:

Houd in een hand het prikapparaat, met uw duim op de duimuit-sparing. Houd met uw andere hand de grijze puntiedop vast en verwijder deze.



Plaats het beschermingsdopje van het lancet op een vlakke ondergrond.



Met het gebruikte lancet nog steeds in het prikapparaat, drukt u het lancet volledig in het midden van het beschermingsdopje.

Verwijder het lancet volgens de instructies in de bijsluiters van uw prikapparaat.

Hulp nodig? Bel gratis de klantenservice van Bayer: 0800 235 22937
www.bayerdiabetes.nl


Gebruik van geavanceerde optie

Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing voor volledige instructies.

Uw meter instellen met geavanceerde optie

Om de geavanceerde optie op uw meter in te stellen en de maaltijdmarkeringen en andere mogelijkheden in te stellen:

1. Druk op **M** om uw meter in te schakelen.
2. Druk op **▲** of **▼** en houd 3 seconden vast.
3. L-1 knippert.
4. Druk op **▲** of **▼** om naar L-2 te wisselen.
5. Druk op **M** om in te stellen.

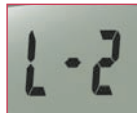

Ontdek hoe deze speciale extra mogelijkheden u kunnen helpen uw diabetes onder controle te krijgen. Ga naar www.bayerdiabetes.nl of bel de klantenservice van Bayer:

0800 235 22937

Gebruik van markeringen

Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing voor volledige instructies.



Vóór de maaltijd = Legt een testresultaat van voor de maaltijd vast.




Na de maaltijd = Legt een testresultaat van na de maaltijd vast.








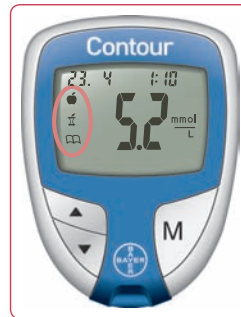


Logboek = Geeft aan dat een testresultaat uitzonderlijk of afwijkend is.



Alarm = Stelt een waarschuwingssignaal in om u eraan te herinneren een test na de maaltijd uit te voeren.

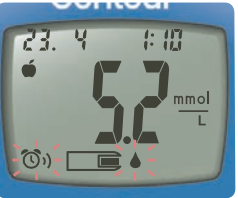




Nadat u een test heeft uitgevoerd en de resultaten in uw beeldscherm ziet:

RESULTATEN MARKEREN	WAT U ZIET	INSTELLEN	WAT U ZIET	WAT DIT BETEKENT	HET ALARM GEBRUIKEN
Vóór de maaltijd Druk op ▲ of ▼	 (knippert)	Druk op M		Resultaat is gemarkeerd als een testresultaat vóór de maaltijd. Druk weer op M om een alarm in te stellen.**	Als het waarschuwingssignaal klinkt, wordt de meter automatisch ingeschakeld en ziet u uw testresultaat van vóór de maaltijd.  Druk op een willekeurige knop om het alarm uit te schakelen. Druk twee maal op een knop om de meter uit te schakelen. Voer nogmaals een test uit, en markeer deze als een testresultaat na de maaltijd  (zie links).
Na de maaltijd Druk op ▲ of ▼	 (knippert)	Druk op M		Resultaat is gemarkeerd als een testresultaat na de maaltijd.	
Logboek Druk op ▲ of ▼	 (knippert)	Druk op M		Resultaat is gemarkeerd in het geheugen als uitzonderlijk of afwijkend. U kunt dit in uw diabetesdagboekje noteren.	

**Het alarm is standaard ingesteld op 2 uur. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige instructies om de alarminstellingen te wijzigen.

Foutcodes en symbolen

Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing voor een volledig overzicht van foutcodes.

E1 	Temperatuur buiten bereik.
E2 	De teststrip bevat niet genoeg bloed om een test uit te voeren. Test opnieuw met een nieuwe teststrip.
E3 	De meter geeft aan dat de teststrip al eerder is gebruikt. Test opnieuw met een nieuwe teststrip.
E11	Abnormaal testresultaat. Test opnieuw met een nieuwe teststrip.



Bayer HealthCare

Bayer B.V. HealthCare, Diabetes Care
Energieweg 1
3641 RT MIJDRECHT, NEDERLAND
Tel.: 0800-BELBAYER
(0800 235 22937)
www.bayerdiabetes.nl



Bayer Consumer Care AG
Postfach
4002 Basel, Switzerland



0088

Bayer

Bayer, het Bayer Kruis, *CONTOUR*, *MICROLET*, No Coding en het No Coding logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bayer.

N1156C
Rev. 7/08